




①ファイルメニューにて[レポート出力設定]を選択

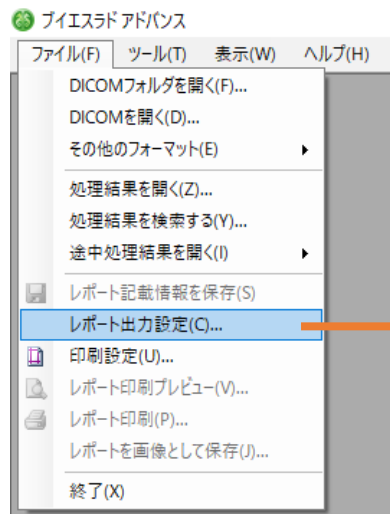


② [レポート出力設定]ウィンドウにて[新規]ボタンを押下

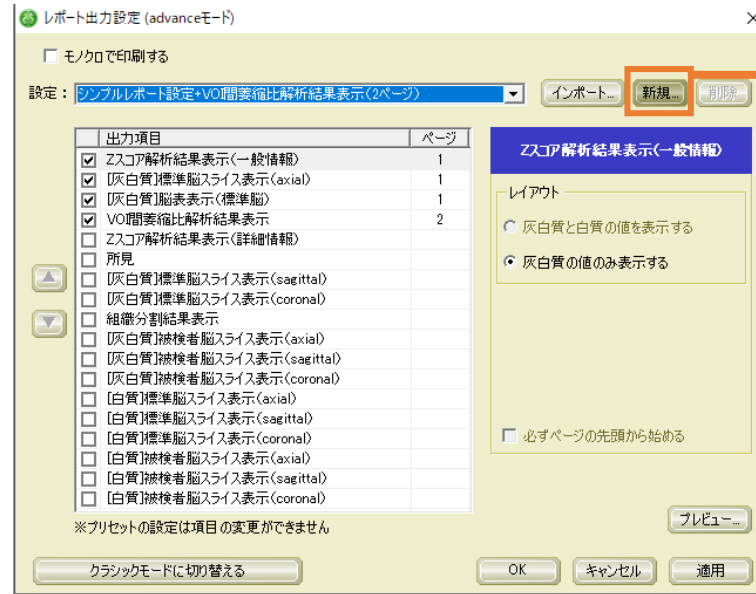


③ [新規レポート出力設定]ウィンドウが表示される。
⇒「新規レポート出力設定名」に新規レポートの設定名を入力。
※例では、「シンプルレポート所見追加版+VOI間萎縮比」と入力。

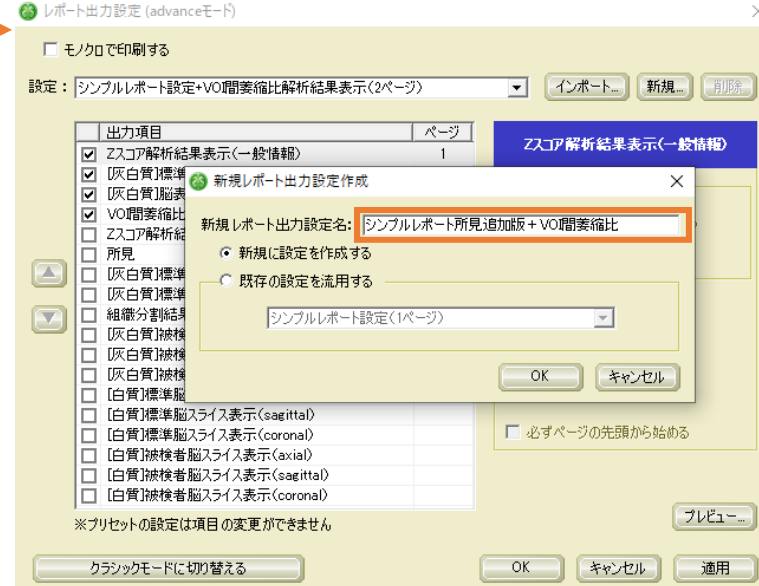


④ [新規レポート出力設定]ウィンドウにおいて、「既存の設定を流用する」を選択し、
現在使用している設定名をプルダウンから選択し、[OK]ボタンを押下する。
※例では「シンプルレポート設定・VOI間萎縮比解析結果表示 (2ページ)」を選択

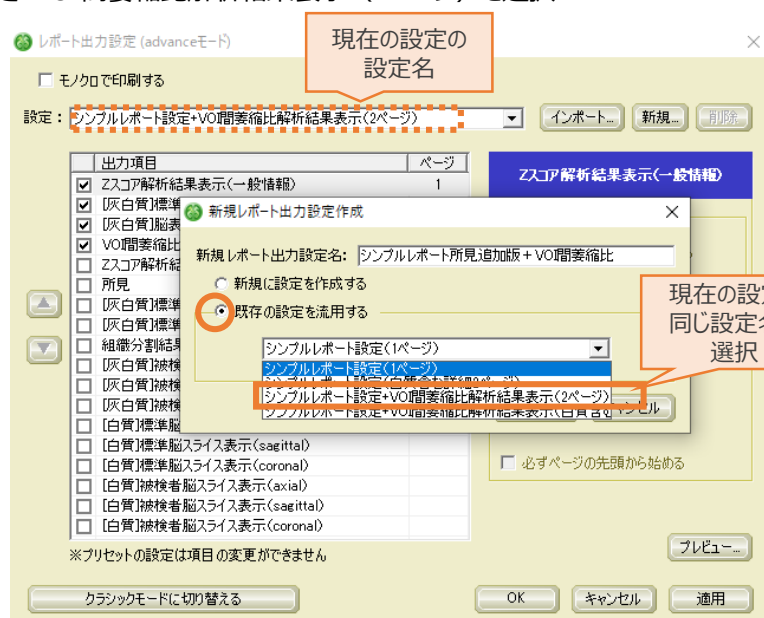


⑤ 新規レポート「シンプルレポート所見追加版+VOI間萎縮比」の
レポート出力項目設定ができるようになる。

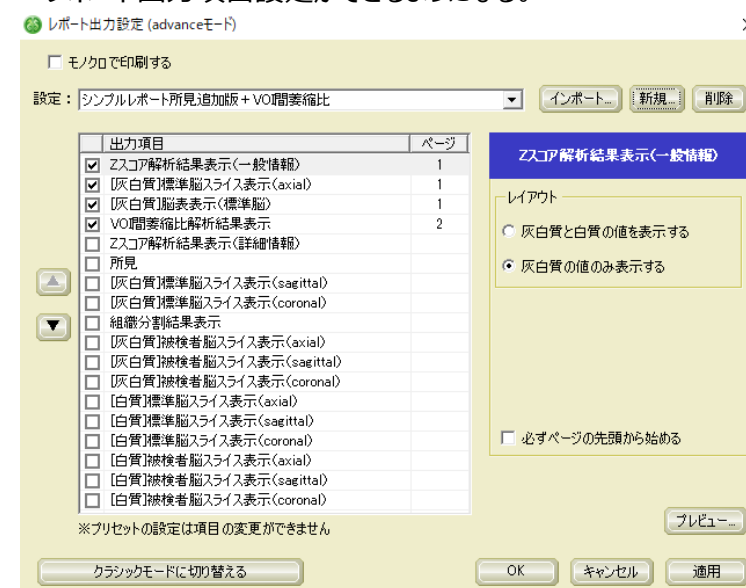


⑥「所見」に☑を入れる。

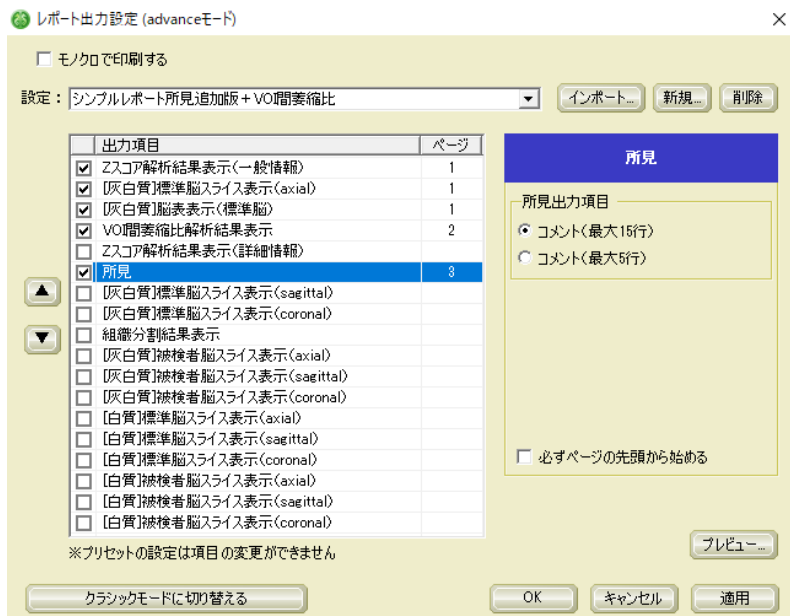


⑦右側の「所見出力項目」の選択項目で、「コメント（最大5行）」を選択する。

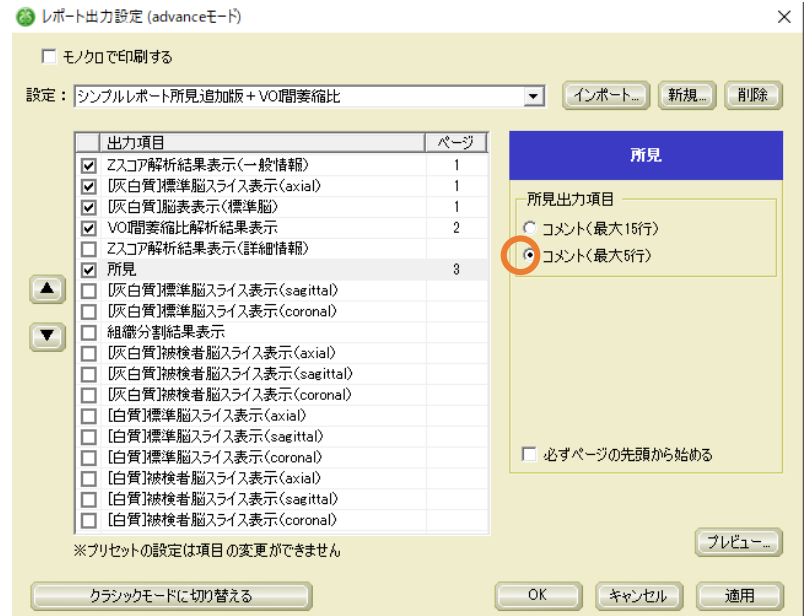

⑧[プレビュー]ボタンを押下し、レポートレイアウトを確認する。

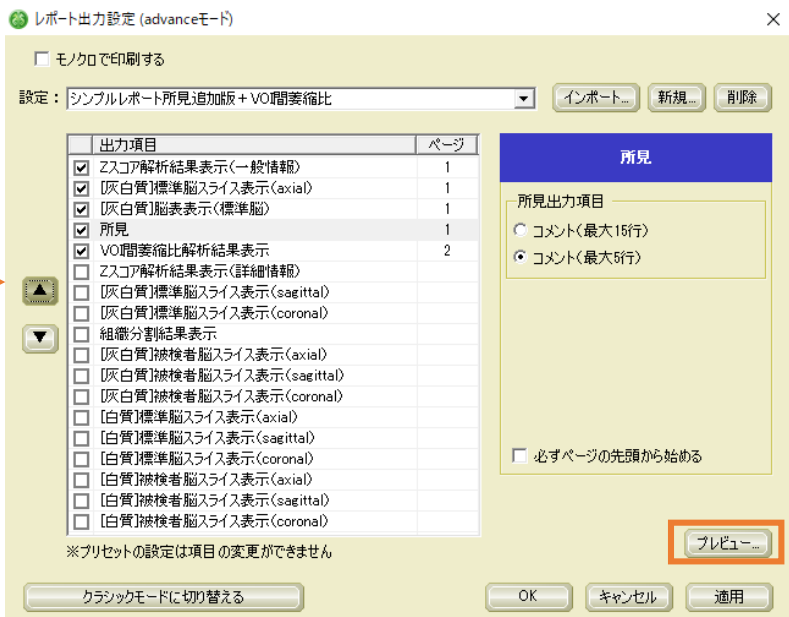

⑨レポートレイアウトに、所見のコメント欄が表示されることを確認する。

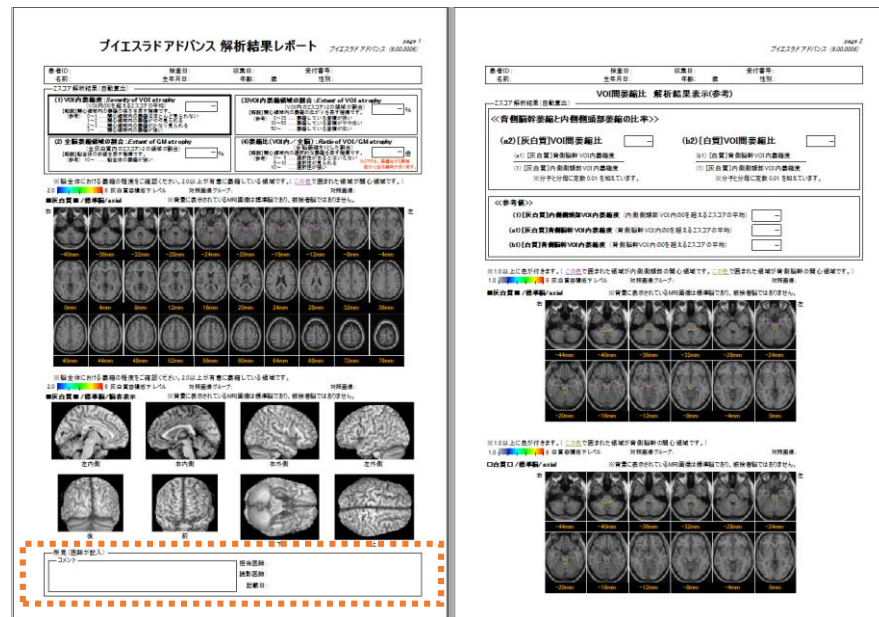

⑩問題なければ、[レポート出力設定]ウィンドウにて [OK]ボタンを押下する。

※これで設定完了です。