


「VSRAD(バイエスラド)通信」は、早期AD診断支援システム「VSRAD」のユーザー登録をいただいている皆様へ、VSRADに関する最新情報やご利用に役立つ情報をお知らせするニュースレターです。

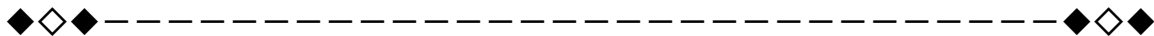

こんにちは。VSRADユーザー登録事務局です。
「VSRAD(バイエスラド)通信」では、VSRADユーザーの皆様から多くいただいたお問合せや、開発最新情報、システムについてのご連絡などをお届けいたします。今回は、Windows 10 の推奨動作環境の追加、推奨撮像条件パンフレットの改訂、及びVSRADシステムサポートセンターの年末年始休業について、ご案内をいたします。

I N D E X

- 《1》 Windows 10 の推奨動作環境追加に関するご案内
- 《2》 推奨撮像条件パンフレット改訂のご案内
- 《3》 事務局より ～ サポートセンター年末年始休業のご案内

《1》 Windows 10 の推奨動作環境追加に関するご案内

お問い合わせを多くいただいております Windows 10 への対応につきまして、VSRAD plus、VSRAD advance 2 (VSRAD advance を含む) の両バージョンにて動作検証を行い、推奨動作環境に追加いたしました。

ただし、下記の現象が発生することがありますので、ご留意いただけますようお願いいたします。対策等の詳細は、VSRADホームページの「Q&A」環境カテゴリ> 共通Q2「Windows 10 では使えないのですか?」をご確認ください。

http://www.vsrad.info/general/q_a/index2.html#windows10

【現象1】

インストール完了後、VSRADを起動時に以下のアラートが表示されることがあります。

【現象2】

解析結果レポートで、VSRADの設定で所見欄に入れたチェックが正しく反映されません。
※advance 2 では改善されています。

【現象3】

処理経過ログ、エラーログ等の各種ログファイルに出力されるOSのバージョンが、「Windows 8」等、正しくない表示がされます。

【現象4】

OS上の印刷に関する設定で、ある特定の設定をした場合、VSRAD上で「印刷プレビュー」

「レポート印刷」、「レポート出力設定」画面を開く際にエラーダイアログが表示され、開かないことがあります。

《2》推奨撮像条件パンフレット改訂のご案内

「MRI装置メーカーによるVSRAD（ブイエスラド）の推奨撮像条件」を掲載したパンフレット『テクニカルシリーズ1（1.5T用）』及び『テクニカルシリーズ2（3T用）』につきまして、改訂いたしました。

各MRI装置メーカー様の改訂内容は、VSRADホームページの「お知らせ詳細」ページ
http://www.vsrad.info/general/information/detail/181226_01.html

推奨撮像条件パンフレットは、VSRADホームページの「マニュアル・パンフレット」ページ（下記URL）よりご確認くださいませ。
<http://www.vsrad.info/general/manual/index.html>

なお、3T MRI画像は、VSRAD plus、VSRAD Ver. 2.0には対応していません。

《3》事務局より ～ サポートセンター年末年始休業のご案内

誠に勝手ながら、VSRADシステムサポートセンターは、下記の通りお休みをさせていただきます。

■年末年始休業のご案内

=====

12月28日（金）17時まで通常稼働いたします。
12月29日（土）から1月6日（日）はお休みさせていただきます。
1月7日（月）10時より通常稼働となります。

=====

休業中にいただいたお問合せに関しましては、休業明けから順次ご回答させていただきます。宜しくお願い申し上げます。

早いもので、今年も残すところあと数日。。。もうすぐ平成最後の年末年始を迎えようとしていますね！

みなさまにとって、今年はどうのような1年でしたでしょうか？VSRADは、ようやくWindows 10にも対応でき、これからまた少しずつ、機能も情報もパワーアップしていけたらと思っています。

全国各地でこれからますます寒さが増していくことと思いますが、お体にお気をつけてよいお年をお迎えください！

来年もどうぞ宜しくお願いいたします！！

編集・発行：VSRADユーザー登録事務局

※ 「VSRAD(ブイエスラド)通信」に関するお問合せや、VSRADをご利用中にお困りのことがございました場合には、お手数ですが、「VSRADシステムサポー

トセンター」までお問合せ下さい。（本メールにご返信いただいてもお受けすることができません。）
VSRADシステムサポートセンターメールアドレス
systemhelp@vsrad.jp

※配信停止をご希望の場合はお手数ですが、件名に「配信不要」等のコメントを明記の上、このメールにご返信をお願いいたします。

Copyright (C) 2018, Eisai Co., Ltd.
